

## تست سوآپینگ

تست سوآپینگ جهت اندازه گیری میزان گلو تار آلدیئید محلول های شیمیایی سطح بالا استفاده می شود.

**تعداد دفعات انجام تست:** در صورت استفاده روزانه از محلول ، روزی یک بار و در صورت استفاده هفتگی، پیش از هر بار استفاده از محلول، تست را انجام دهید. اگر روزی ۳۰ بار از محلول استفاده می کنید، به ازای هر ۱۰ بار استفاده از محلول یک بار تست را انجام دهید

### نحوه انجام تست:

- ۱- یک عدد نوار تست را از ظرف خارج کرده و درب ظرف را محکم ببندید.
- ۲- نوار تست را به مدت یک ثانیه داخل محلول قرار دهید و خارج کنید.
- ۳- نوار تست را کمی تکان دهید و ۱۵ ثانیه صبر کنید.
- ۴- بلافاصله رنگ نوار تست را با خانه های رنگی روی ظرف تست مقایسه کنید. (اگر تغییر رنگ نوار تست با خانه های شماره ۲ تا ۲,۵ مطابقت داشته باشد محلول قابل استفاده است.
- ۵- در صورت تغییر رنگ نوار تست به طیف **زرد** محلول قابل استفاده نمی باشد.



واحد کنترل عفونت

توجه: بعد از پایان زمان ماندگاری محلول ( ۲۸ روز برای کورسولکس) با استناد به نتیجه تست نمی توان از محلول استفاده کرد و محلول بایستی حتماً تعویض گردد .