

عنوان

دستورالعمل ایمنی گازهای طبی

(بر اساس آئین‌نامه‌ی سیلندرهای تحت فشار)

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

کد مدرک: BH/OcHeIns/۰۷/۰۱

تاریخ تهیه: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴



۱. پیش از تحویل سیلندر، از سالم بودن تمامی قسمت‌های آن مطمئن شوید.
۲. استعمال دخانیات در محل‌های تولید و ذخیره‌ی گازهای طبی ممنوع است.
۳. به طور عمومی از روغن‌کاری شیر کپسول و اتصالات مربوطه خودداری کنید.
۴. در صورت یخ زدن شیر کپسول، از آب نیم‌گرم برای برداشتن یخ استفاده کرده و سپس برای انتقال به محیط گرم اقدام کنید.
۵. کپسول‌ها باید به صورت ایستاده و با ابزار مناسب از قبیل زنجیر و ... جهت پیشگیری از سقوط مهار شوند.
۶. کپسول‌ها را از فاصله از یکدیگر قرار دهید و بر اساس نوع گاز، کپسول‌ها را به صورت مجزا نگهداری نمایید.
۷. کلاهک محافظ شیر بایستی بر روی آن قرار داشته باشد.
۸. از قرار دادن کپسول در محیط مرطوب خودداری نمایید.
۹. از وجود وسایل اطفاء‌حریق در نزدیکی محل نگهداری کپسول‌ها اطمینان حاصل نمایید.
۱۰. سیلندرهای پر و خالی را در مجاورت یکدیگر قرار ندهید.
۱۱. از قرار دادن کپسول‌ها در مجاورت گرما و زیر نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
۱۲. از آویزان کردن لباس و روپوش و قرار دادن هر نوع وسیله‌ای بر روی کپسول اجتناب کنید.
۱۳. از غلتاندن سیلندر و یا کشیدن آن بر روی زمین خودداری نمایید و از توالی جهت حمل سیلندر استفاده کنید.
۱۴. در صورت مشاهده‌ی ایراد فنی یا اعمال و شرایط ناایمن در وضعیت سیلندرها، نواقص و مشکلات را به واحد بهداشت حرفه‌ای و تاسیسات گزارش دهید.

تهیه و تنظیم

زهرا محرابی - کارشناس بهداشت حرفه‌ای