

دستور العمل ضد عفونی اتاق ایزوله پس از ترخیص بیمار

پس از ترخیص بیمار با پوشیدن **وسایل حفاظت فردی** تجهیزات اتاق بیمار مطابق جدول تمیز و ضد عفونی شود:

در پلاستیک زرد دو لایه گذاشته و با بین مخصوص به لنجری منتقل شود	ملحفه ها ، پتو ، رو بالشی
شستشو با آب و مواد شوینده و در صورت نیاز ضد عفونی	کاف فشار سنج - محفظه آب مقطر مانومتر
شستشو با آب و مواد شوینده سپس غوطه وری در محلول سطح بالا (پراناسید HP) طبق دستور العمل نصب شده در اتاق کثیف	آمبویک و تیغه لارنگوسکوپ
بر طرف کردن آلودگی های واضح با آب و دترجنت سپس ضد عفونی با محلول سطح پایین مانند سارفوسپت یک درصد	کناره های تخت، لاکر، میز بیمار
ضد عفونی با محلول سریع الاثر یا الکل	مانیتور ها، پمپ انفوزیون، ونتیلاتور و گوشی پزشکی..
بدنه دستگاه با الکل محفظه آب مقطر خالی شود (در صورت استفاده هر 24 ساعت عوض شود) تجهیزات تنفسی با محلول ضد عفونی سطح بالا (پراناسید) ضد عفونی شود	نیولایزر
شستشو با آب و دترجنت و سپس غوطه وری در محلول سارفوسپت 2 درصد و سپس آب کشی و خشک کردن. در موارد عفونی با محلول سطح بالا بدنه ساکشن با الکل	ساکشن
با دستمال آغشته به سارفوسپت یک درصد تمیز شود	رویه تشک و بالشت
در صورت پر شدن 3/4 و گذشت بیشتر از 5 روز از تاریخ شروع تعویض گردد	سفتی باکس
سرویس بهداشتی با وایتکس 1 درصد یا تیرک و کف اتاق با محلول سطح پایین و با تی مخصوص اتاق ایزوله کشیده شود. در صورتیکه حجم خون یا ترشحات بیشتر از 30 سی سی است: ابتدا دستمال یک بار مصرف روی ترشحات گذاشته شود و سپس وایتکس 10 درصد روی پارچه ریخته و بعد از 10 دقیقه دستمال یک بار مصرف جمع آوری و با آب و دترجنت محل تمیز و با سارفوسپت ضد عفونی می گردد.	سرویس بهداشتی، کف اتاق
بستن دریچه کانال ها و درزها و سپس گذاشتن دستگاه نوکواسپری با توجه به حجم اتاق. یک ساعت بعد از اتمام اتاق قابل استفاده است.	هوای اتاق و قسمت های غیر قابل دسترس تجهیزات

توجه: ابتدا ضد عفونی سطوح انجام و در پایان نوکواسپری گذاشته شود